

Fiche Opérateur Standard : Test Rapide DETERMINE VIH 1/2



1. Collecter les kits de test et autres articles de laboratoire nécessaires.



2. Utiliser 1 bande de test et s'assurer de préserver le numéro de lot sur le paquet restant de bandes.




3. Écrire le numéro d'identification du client sur la bande de test.



4. Enlevez la feuille métallisée de protection.



5. Recueillir 50 µl d'échantillon avec une pipette pasteur ou une pipette de précision.

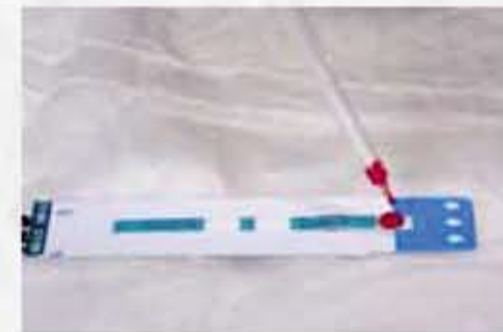

6. Déposer l'échantillon dans la zone absorbante de la bande.



7. **Uniquement pour le sang total** ajouter 1 goutte de tampon dans la zone absorbante la bande.



8. Attendre 15 minutes (pas plus de 60 minutes) avant la lecture des résultats.




9. Lire et enregistrer les résultats et d'autres renseignements pertinents sur la feuille de recueil de résultats.

Résultats de Test Rapide Détermine VIH

Positif :

2 lignes de n'importe quelle intensité apparaissent dans les deux zones de **contrôle** et **patient**.

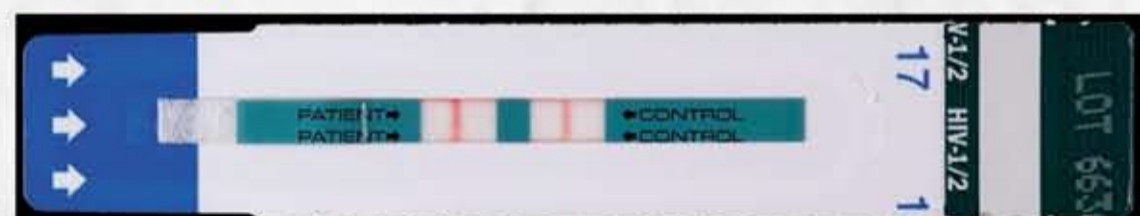

Négatif :

1 ligne apparaît dans la zone de **contrôle** et aucune ligne dans la zone patient.



Invalide :

Aucune ligne n'apparaît dans la zone de **contrôle**. Ne pas rapporter des résultats invalides. Répéter le test avec un nouveau dispositif même si une ligne apparaît dans la zone patient.

