

# Fiche Opératoire Standard : Test Rapide UNI-GOLD VIH



1. Collecter les kits de test et autres articles de laboratoire nécessaires.



2. Sortir le dispositif du paquet et écrire le numéro d'identification du client.



3. Prélever en utilisant une pipette à usage unique.



4. Ajouter 2 gouttes (approximativement 60  $\mu$ l) de échantillons au creux du dispositif.



5. Ajouter 2 gouttes (approximativement 60  $\mu$ l) du réactif de lavage au creux du dispositif.



6. Attendre 10 minutes (pas plus de 20 min) avant de lire les résultats.




7. Lire et enregistrer les résultats et autres renseignements pertinents sur la feuille de résultats.

## Résultats de Test Rapide Uni-Gold VIH

### Positif

**2 lignes** de n'importe quelle intensité apparaissent dans les **deux zones contrôle et test.**

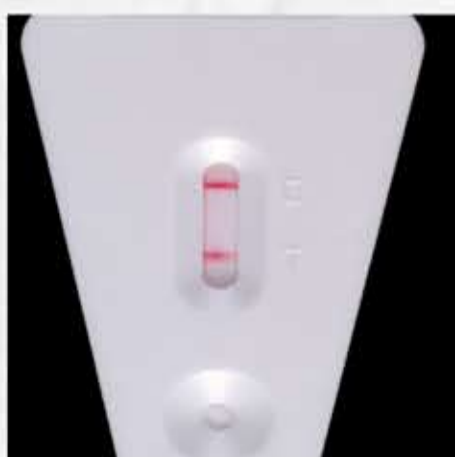

### Négatif

**1 ligne** apparaît dans la zone de **contrôle** et aucune ligne dans la zone test.



### Invalide

**Aucune ligne** n'apparaît dans la zone **contrôle**. Ne pas rapporter de résultats invalides. Répéter le test avec un nouveau dispositif même si une ligne apparaît dans la zone test.

