


# Fiche Opérateur Standard : Test rapide RETROCHECK


- 1- **Rassembler les matériels** nécessaires pour réaliser le test: le kit (dispositif-test, pipette à usage unique, un flacon de tampon)
- 2- **Sortir le dispositif** de son emballage,
- 3- **Etiquetter avec le numéro ou l'identification du client**

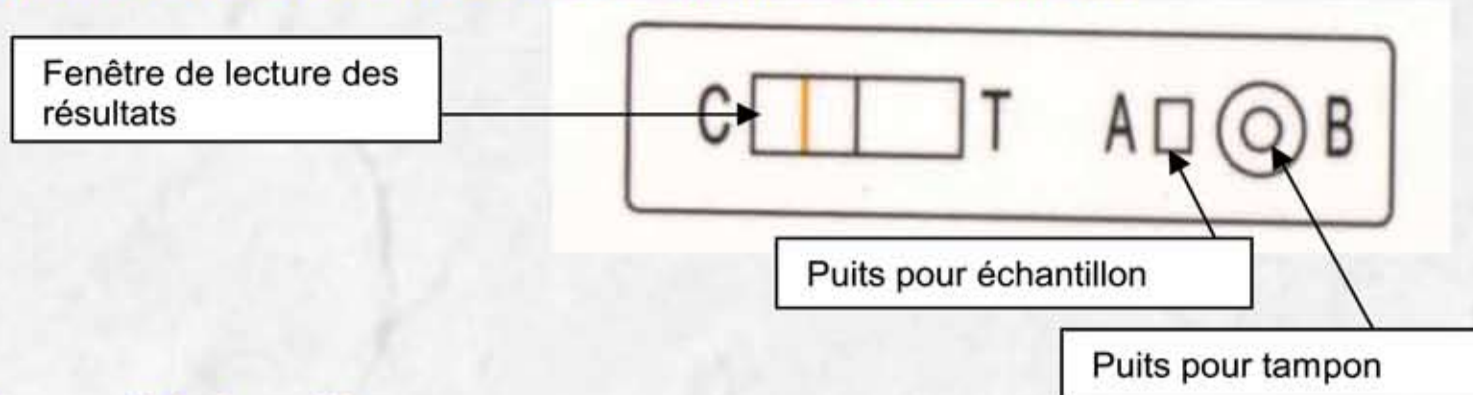

## 4- collecter l'échantillon



- 5- **Prélever l'échantillon** (sang total ou sérum) en employant la pipette fournie dans le kit.

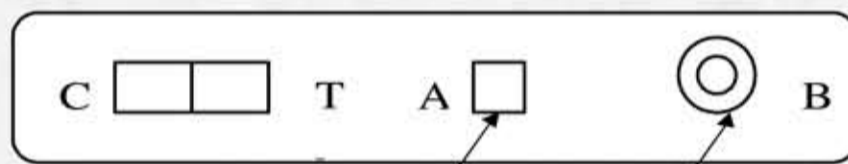

4- Déposer **une** goutte (avec pipette fournie) ou **50µl** d'échantillon dans le puit A

5- Déposer **5** gouttes de **solution tampon** dans le puit B

## 6- Régler le chronomètre et attendre 10 mn



## 7- Lire le résultat dans la fenêtre de lecture après 10 mn

## 8- Interpréter les résultats :

**Résultat positif :** Présence de bande rouge au niveau de la lettre « T » et une autre bande rouge au niveau de la lettre « C » (quelque soit l'intensité de la coloration)



**Résultat négatif :** Présence de bande rouge au niveau de la lettre « C »



**Résultat invalide :** La bande au niveau de « C » est le contrôle interne du test. Si aucune bande n'apparaît sur C même si la bande T est présente. Le test est invalide. **Il faut refaire le test avec un autre dispositif-test.**

### Invalide

